

# Emballage afmontering



## Vejledning



HS Sengen leveres i en transportemballage som vist på foto.

I det følgende vises, hvordan transportemballagen afmonteres korrekt!

**OBS! Transportemballagen skal efterfølgende opbevares i tilfælde af, at sengen skal transporteres/sendes og denne anvisning følges således modsat.**

Model / Størrelse:	Længde:	Bredde:	Højde:	Vægt:
HS Seng 624	230 cm	115 cm	125 cm	ca. 240 kg
HS Seng 800	230 cm	100 cm	105 cm	ca. 200 kg
HS Seng 900	230 cm	115 cm	105 cm	ca. 220 kg



**+** PH2

### Værktøj:

Anvend en PH2 skruetrækker eller en skruemaskine med en PH2 Bit.

### OBS!

Hvis sengen skal i transportemballagen igen, må der kun anvendes SKRUER i str. 4.0 x 25 mm

### Farvemarkeringernes betydning:



De røde markeringer skal **IKKE** skrues fra hinanden.




De grønne markeringer skal skrues fra hinanden.



# Emballage afmontering



## Vejledning

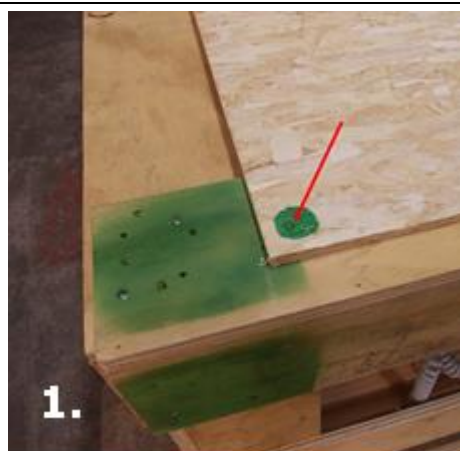

Skru skruerne op i hvert hjørne af låget og fjern låget.




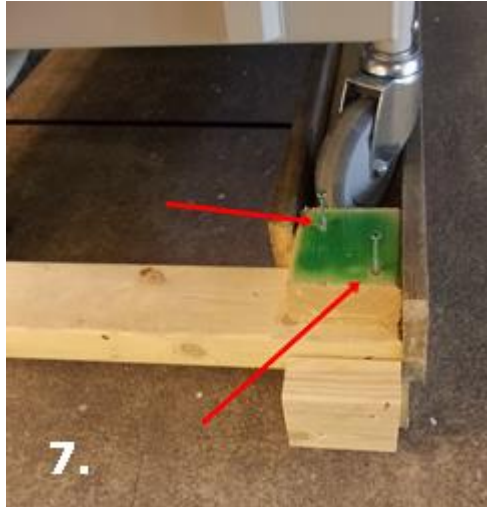
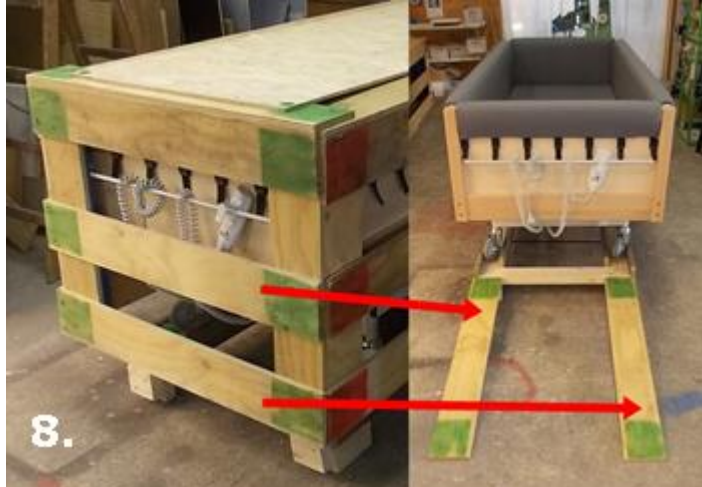
Skru skruerne op i hver ende af sengen.



# Emballage afmontering



## Vejledning

 <p>6</p>	<p>Fjern siderne.</p>
 <p>7.</p>	<p>Skru de grønne stopklodser af. Båndstrammer afmonteres.</p>
 <p>8.</p>	<p>2 af brædderne fra enden lægges på bundrammen og bruges som kørerampe.</p>

