

Mobilstander



Brugervejledning

Mobilstanderen fra Jysk Handi er udviklet til brugere der har behov for, at have kommunikationsudstyr foran sig enten siddende eller liggende.


LX Armen kan positioneres i alle retninger.

Indhold

Mobilstanderen leveres med justeringsværktøj til LX Armen.

	<p>Værktøj der medfølger:</p> <ul style="list-style-type: none">1 stk. Umbracnøgle 3/16"1 stk. Umbracnøgle 3/32"1 stk. T-nøgle Umbraco 5/32"2 stk. Strips – små (til evt. ledningsophæng)4 stk. Strips – store (til evt. ledningsophæng)1 stk. Fingerskrue
	<p>Derudover skal der bruges:</p> <ul style="list-style-type: none">1 stk. 13 mm Fastnøgle1 stk. 6 mm Umbracnøgle <p>Medfølger ikke</p>
	<p>Justering og spænding af håndtag</p> <p>Håndtaget justeres/spændes med medfølgende umbracnøgle 3/16".</p> <p>Håndtaget kan drejes og justeres op og ned.</p>



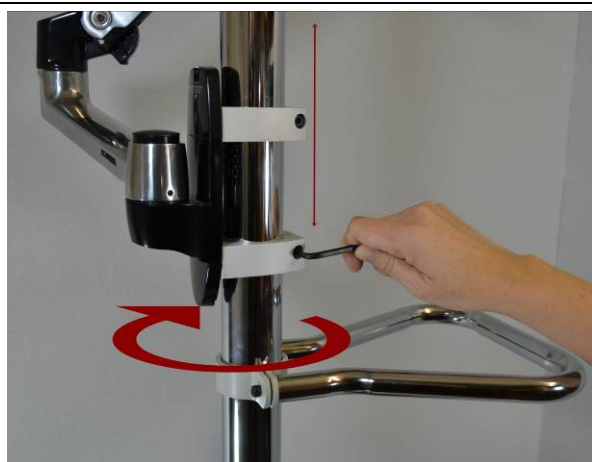

Justering og spænding af holderen til LX Armen

Holderen justeres/spændes med Umbracnøgle 3/16".

Holderen kan drejes og flyttes op og ned.



Justering og spænding af øverste arm

Her spænder/løsner man modstanden på den øverste arm.

Hvis den skal kunne dreje nemmere løsnes skruen MOD uret og hvis armen skal gå strammere spændes skruen MED uret.






Justering og spænding af nederste arm

Her spænder/løsner du stramheden på den nederste arm.

Hvis den skal kunne dreje nemmere løsnes skruen MOD uret og hvis armen skal gå strammere spændes skruen MED uret.






	<p>Justering af LX Armens modstand</p> <p>Her justeres hvor meget den øverste arm skal fjedre, når man har monteret en computer på armen.</p> <p>Brug den medfølgende T-nøgle umbraco 5/32 ".</p> <p>Hvis man drejer MED uret bliver armen hårdere og løsner man MOD uret slækkes armen.</p>
	<p>Justering af LX hovedet</p> <p>Her kan man justere stramheden på LX Armen sidevejs.</p> <p>Dette kræver en 6 mm umbracnøgle og en 13 mm Fastnøgle (medfølger ikke).</p> <p>Spændes MED uret strammere, MOD uret løsere.</p>
	<p>Hældning af skærm / justergreb</p> <p>Med det røde håndtag kan man justere hældningen på skærmen frem og tilbage.</p> <p>Drej håndtaget MOD uret så løsner man og MED uret spænder man</p>





Justering af spænding sidevejs

Hvis man vil justere stramheden på skærmen, hvor man drejer den sidevejs, starter man med at dreje skærmen, så den røde prik i hullet bliver synlig

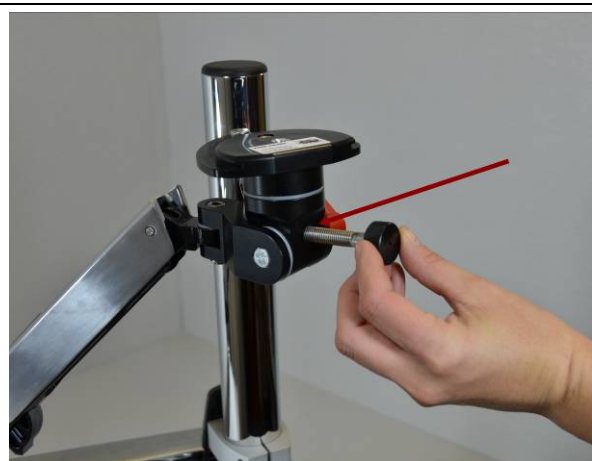

Derefter skrues den medfølgende bolt i hullet med fingrene til den er i bund.



Dernæst tager man en 6 mm umbraconøgle (medfølger ikke) og sætter den i hullet som vist.

Drejer man MED uret spændes den og MOD uret så løsnes den.



Mobilstander



Brugervejledning



Når man har den ønskede stramhed tager man bolten ud igen!

