



# Dobbelt Y

## Brugervejledning




Dobbelt Y'et sættes mellem benene, hvor det derefter reguleres.

Dette gøres ved og løsne kontramøtrikkerne i begge sider (1). De skal begge drejes samme vej.

Derefter drejer man med midterstykket (2), med eller mod uret, alt efter om dobbelt y'et skal være smallere eller bredere.

Når den ønskede bredde er nået, spænder man kontramøtrikkerne igen (1). De skal begge drejes samme vej.

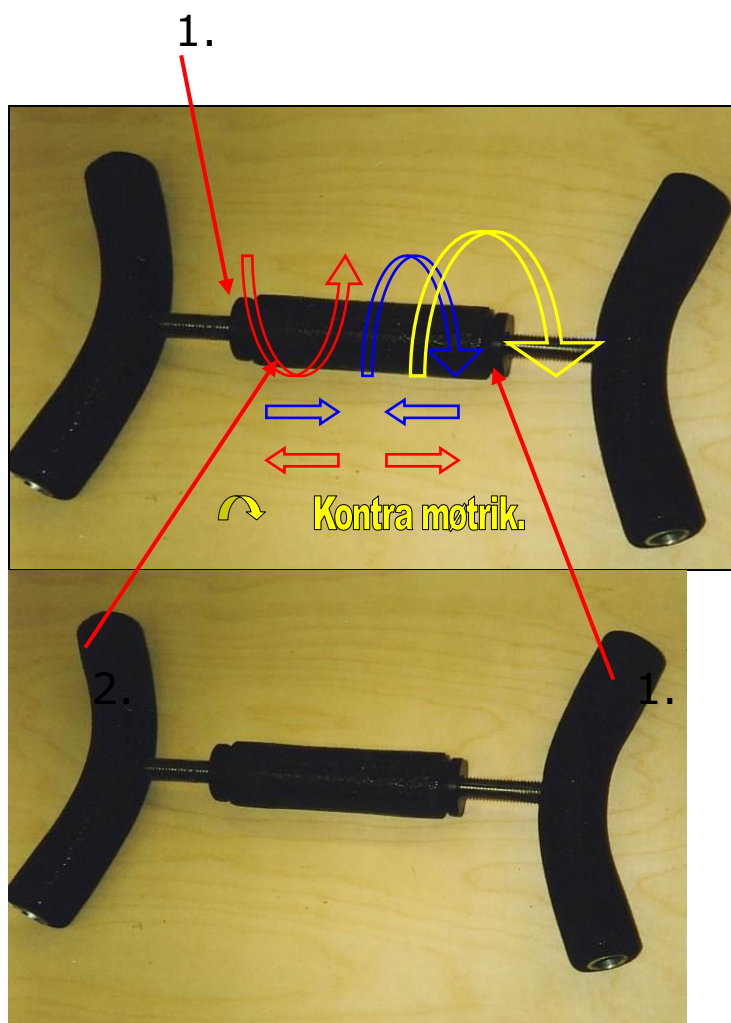




# Dobbelt Y

Brugervejledning

## Rengøringsvejledning

Dobbelt Y desinficeres efter brug med følgende produkt:

	Varenr.:	Varenavn:
	904200	IDZ Rapid A, desinficeringsmiddel

Ved grundig rengøring skilles delene ad og desinficeres hver for sig.

