



# JYSK HANDI

*hjælpemidler til børn og voksne siden 1990*


## GLØDESIKKERT CIGARETRØR

Standard  
Solid  
Standard til Flexarm  
Solid til Flexarm

---

*Brugervejledning (DK)*

*Rev. 1.0*

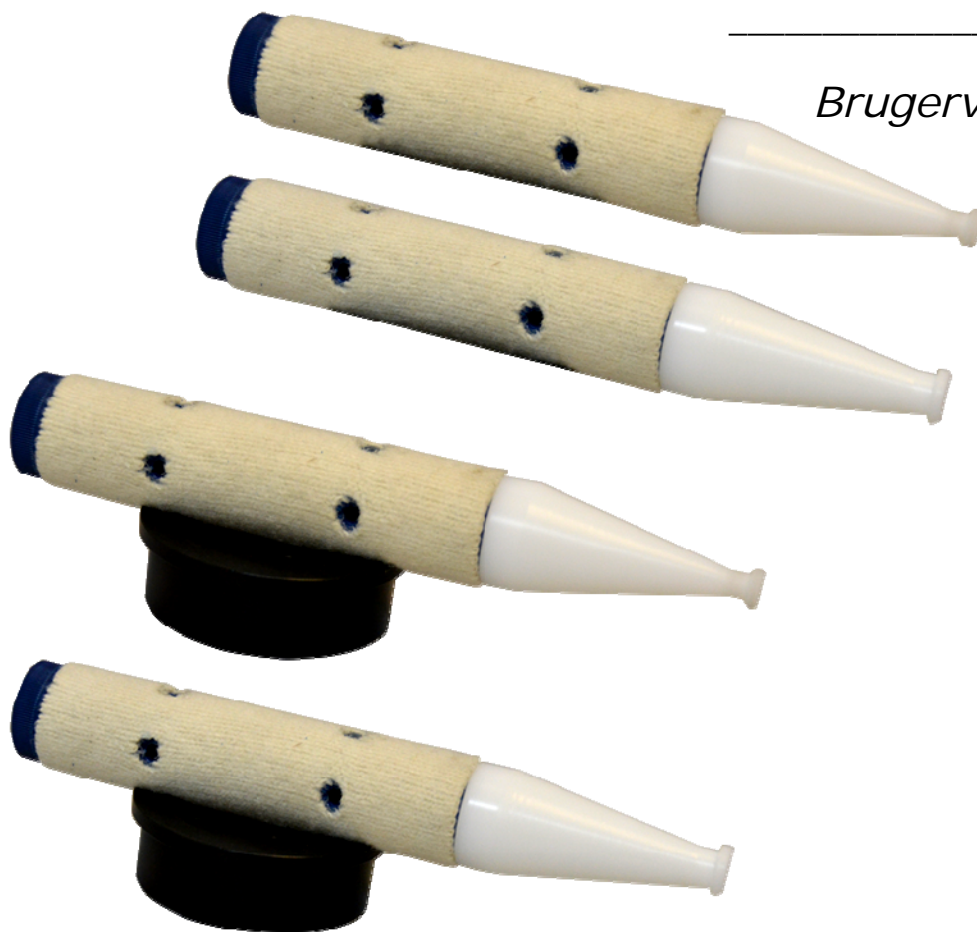

Brugervejledningen kan downloades på [www.jyskhandi.dk](http://www.jyskhandi.dk)  
under produktet eller scan QR-koden.



# Glødesikkert cigaretrør



Brugervejledning

1.	Generelt .....	3
1.1.	Produkt anvendelse .....	3
1.2.	Certification .....	3
2.	Produkt oversigt .....	4
3.	Anvendelse .....	5
3.1.	Opstart .....	5
3.2.	På og afmontering i Flexarm .....	6
3.3.	Bevægelser i flexarm .....	6
3.4.	Efter endt rygning .....	6
4.	Vedligeholdelse og rengøring .....	7
5.	Reservedele .....	7
5.1.	Udskiftning af O-ring .....	7
6.	Bortskaffelse .....	8
7.	Tekniske data .....	8





Du har valgt et **Glødesikkert cigaretrør** fra Jysk Handi.

Læs hele brugervejledningen, så du får størst mulig glæde af dit Glødesikkert cigaretrør og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet. Brugervejledningen kan også downloades på vores hjemmeside [www.jyskhandi.dk](http://www.jyskhandi.dk) under produktet.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme afsnit i denne brugervejledning, der ikke er relevant for deres produkt.

## Symboler

	Dette ikon markerer forholdsregler og informationer der bør læses for, at sikre korrekt og sikker brug af produktet.
--	--

## 1. Generelt

### 1.1. Produkt anvendelse

Det Glødesikkert cigaretrør er udelukkende beregnet til rygning af cigaretter med filter.

Det Glødesikkert cigaretrør er udviklet til fastholdelse og fiksering af en cigaret med filter i et glødesikkert rør, som sikre optimale rygeforhold for brugere med ufrivillige bevægelser, ukontrolleret bid eller ved risiko for tab af cigaret eller cigaretglød.

Det Glødesikkert cigaretrør kan anvendes af sengeliggende rygere.

### 1.2. Certification

#### Glødesikkert cigaretrør:

- er CE-mærket i henhold til Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF
- har gennemgået risikoanalyse i henhold til EN 12182.
- er klassificeret 30-30-00-03 i.h.t. ISO 9999:2011

	Tøm altid cigaretrøret for aske, filter og evt. gløder efter endt rygning.
	Det Glødesikkert cigaretrør forhindrer ikke antændelse af brandbare dampe og væsker.
	Jysk Handi påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sammensættes på anden vis, end angivet i denne brugervejledning.






## 2. Produkt oversigt

Glødesikkert cigaretrør			
			
Standard	Solid	Standard til Flexarm	Solid til Flexarm
Vare nr. 20 00 00	Vare nr. 20 00 01	Vare nr. 21 03 10	Vare nr. 21 03 20
HMI nr.: 63 935	HMI nr.: 72 190	HMI nr.: 72 202	HMI nr.: 73 989

1. Mundstykke
2. O-Ring
3. Rør
4. Filt
5. Endeprop
6. Flexring

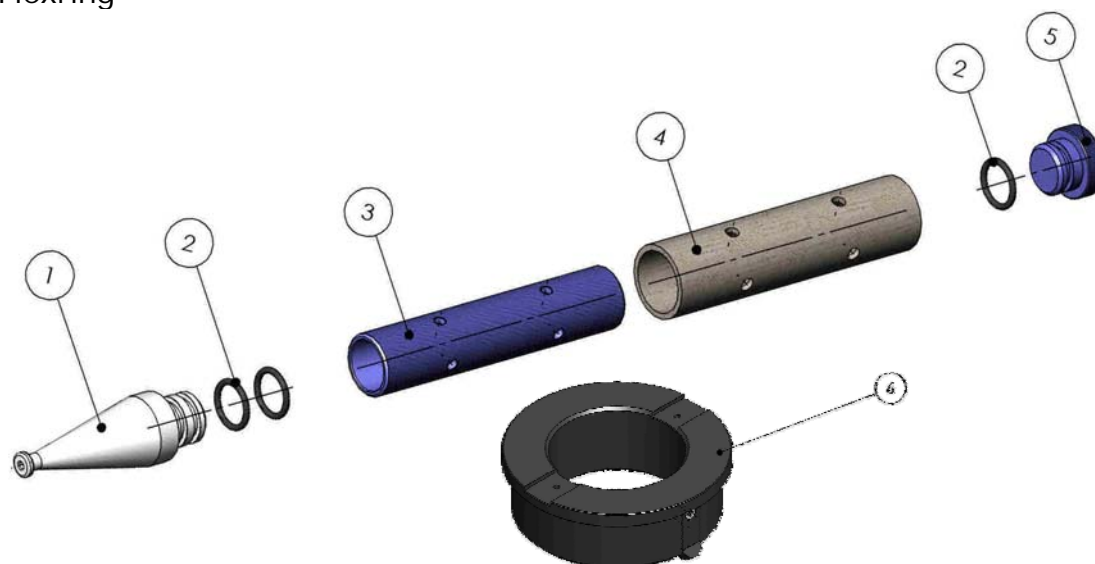




## 3. Anvendelse

Det Glødesikkert cigaretrør er udviklet til fastholdelse og fiksering af en cigaret med filter i et glødesikkert rør, som sikre optimale rygeforhold for brugere med ufrivillige bevægelser, ukontrolleret bid eller ved risiko for tab af cigaret eller cigaretglød.

Det Glødesikkert cigaretrør kan anvendes af sengeliggende rygere.

Afhængig af brugerens evne, kan der være behov for hjælp til opstart, afslutning samt rengøring af det Glødesikkert cigaretrør.


### 3.1. Opstart

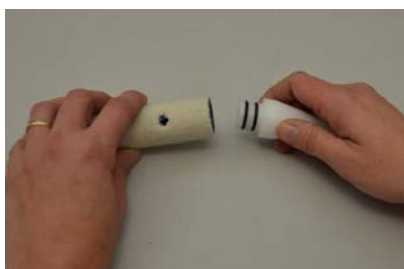

1. Træk mundstykket ud.



4. Sørg for at der er ild i cigaretten.

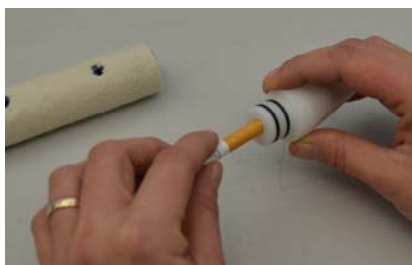

2. Isæt cigaretten i mundstykket.



5. Før cigaretten ind i cigaretrøret.



3. Tænd cigaretten.



6. Ryg via mundstykket.





## 3.2. På og afmontering i Flexarm



1. Sæt det Glødesikkert Cigaretrør til Flexarm ned i ringen eller flaskeholderen.



3. Låsen sidder under ringen – tryk og den løsnes fra ringen.




2. Klik og den sidder i ringen eller flaskeholderen.




4. Det Glødesikkert cigaretrør er afmonteret.

## 3.3. Bevægelser i flexarm

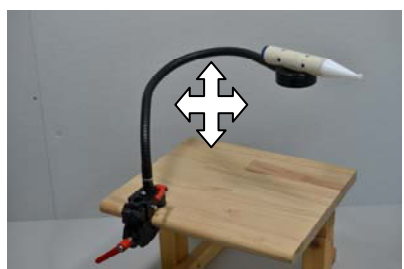

Flexarmen kan bevæges i alle retninger.

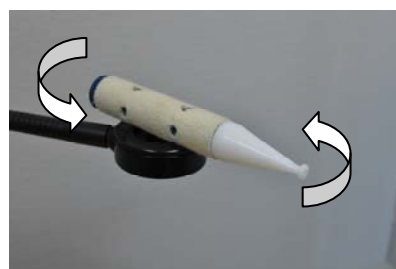

Ringens med det Glødesikkert Cigaretrør kan roteres 360°

## 3.4. Efter endt rygning

1. Mundstykket afmonteres.
2. Cigarettskoddet fjernes, brug evt. en pincet eller lignende.
3. Tøm røret for aske i et askebæger.






## 4. Vedligeholdelse og rengøring

1. Adskil mundstykket fra røret og fjern endeproppen.
2. Røret rengøres med lunken vand og opvaskemiddel – brug evt. en almindelig tandbørste eller flaskerenser til rengøringen af indersiden.
3. Filten rengøres med lunken vand og opvaskemiddel – gnid filten ind, skyl og lad tørre.
4. Mundstykket og endeproppen vaskes ligeledes med lunken vand og opvaskemiddel, brug evt. en piberenser til rengøring indvendigt i mundstykket.

## 5. Reservedele

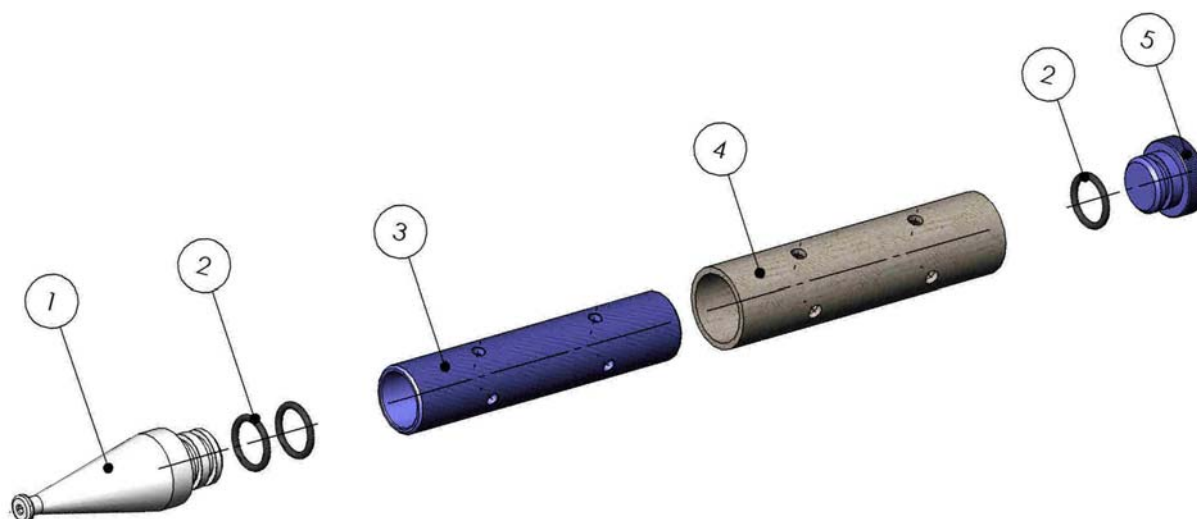

Position	Vare nr.:	Varenavn:
1	20 00 10	Mundstykke for cigaretrør, Standard
1	20 00 11	Mundstykke for cigaretrør, Solid
3 – 4	20 00 20	Rør med Filt for cigaretrør
5	20 00 30	Endeprop for cigaretrør
2	89 96 17	O-ring for cigaretrør

### 5.1. Udskiftning af O-ring

Hvis mundstykket eller endeproppen mister evnen til fastholdelse i røret bør O-ringene udskiftes. De defekte O-ringe kan fjernes med en spids genstand.







## 6. Bortskaffelse

Dette produkt er fremstillet af en miljøbevidst producent.

Dette produkt kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

Symbolet, den "overkrydsede skraldespand" er placeret på dette produkt for at opfordre til genbrug, hvor det er muligt.

Tag venligst miljøansvar og genbrug dette produkt gennem din lokale genbrugsstation, når dets levetid er omme.



## 7. Tekniske data

Alle mål er angivet i mm.

Standard, Solid: 100 g

Standard, Solid til Flexarm: 180 g



*Glødesikkert Cigaretrør Standard*

Mundstykke, rør og endeprop er fremstillet i plastmaterialer der er ugiftige og godkendt til kontakt med levnedsmidler.

Rør og endeprop er i et brandhæmmende og selvslukkende plastmateriale.

Filteren omkring røret er ren uld.

