


# Koldskumsmadræs med betræk



Brugervejledning

## 1. Produktbeskrivelse

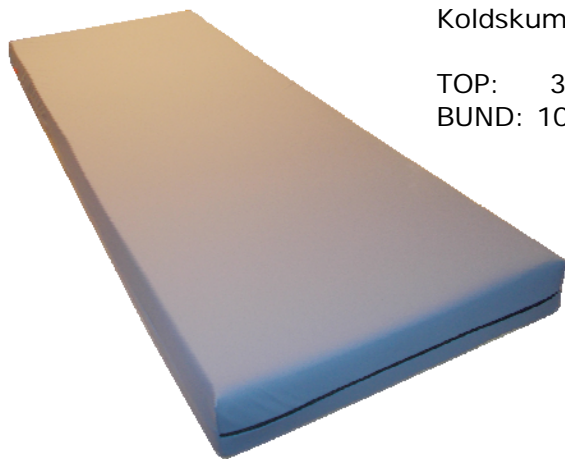


Koldskumsmadræs med inkontinensbetræk består af følgende:

TOP: 3 cm fleksibelt PUR på polyetherbasis (blå) (Hård)  
BUND: 10 cm Polyurethane Foam (hvid) (Medium)

Sårkategori: 2

Betræk: Inkontinensbetræk,  
aftageligt

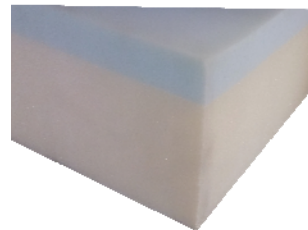

## 2. Produktanvendelse

Koldskumsmadrassen er kendetegnet ved høj komfort og lang holdbarhed. Begge sider af madrassen kan anvendes afhængig af behovet.

Blå skum har hårdhed: Hard

Hvid skum har hårdhed: Medium

## 3. Produktbetjening

### 3.1. Rengøring af inkontinensbetræk

Lyn op og afmonter betrækket.

- 95 gr. i vaskemaskine
- Tørretumbler høj varme
- Tåler ikke blegning
- Må ikke stryges

INCONTINENCE  
COVER

BI-elastic  
PU-coated



Vaskemærket er placeret inde i betrækket.



Brug aldrig syrer, baser eller opløsningsmidler på madras og betræk.

### 3.2. Rengøring af koldskum

Ved lette overfladiske indsigninger af kropsvæsker via lynlåsen kan madrassen rengøres med varmt vand.



Ved stor gennemsvivning af kropsvæsker (blod, urin, afføring, opkast m.v.) anbefales det, at madrassen bortskaffes.



# Koldskumsmadræs med betræk



Brugervejledning

## 3.3. Montering af inkontinensbetræk

Mærket "DENNE SIDE OP!" på betrækket indikerer, hvilken skumtype der vender opad.

Påmonter betrækket og lyn sammen.

Madrassen placeres derefter i sengen med mærket "denne side op!" - opad.

